

FUSION^{XC}™

Manuel d'utilisation



- FUSXC80
- FUSXC84
- FUSXC80VIS
- FUSXC80VIS1
- FUSXC80VIS1-4H
- FUSXC80VIS1-4HNS
- FUSXC4280
- FUSXC4880

Garantie 1 an du produit

MOXI Enterprises, LLC garantit les produits de la Série FUSION XC pendant une période d'un (1) an, soit douze (12) mois, à compter de la date d'achat.

Les composants du matelas sont couverts par une garantie limitée de douze (12) mois. L'usure normale n'est pas couverte au titre de la garantie. Les matelas exposés à des agents chimiques de nettoyage puissants, par exemple de l'eau de Javel, ne sont pas couverts au titre de la garantie. La housse du matelas ainsi que tous les autres composants du système de matelas seront garantis pendant une période de douze (12) mois.

La présente garantie ne s'applique pas aux produits qui ont fait l'objet d'un accident, d'une mauvaise utilisation ou d'une utilisation à mauvais escient.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec MOXI par téléphone au (800) 942-7678 ou au (314) 771-5222 ou par fax au (314) 771-5225.



MOXI Enterprises | 1939 S. Vandeventer Ave., St. Louis, MO 63110
moxiusa.com | 1-800-942-7678 | tél. 314.771.5222 | fax 314.771.5225


Installation du matelas :

Le système est fourni complètement assemblé.
Placez le matelas directement sur un encadrement de taille appropriée.

Protocole de nettoyage :

- (1) La housse peut être essuyée avec une solution de nettoyage antibactérien douce.
- (2) Tous les autres composants peuvent être essuyés avec une solution de nettoyage antibactérien douce.

Ces instructions sont destinées à être suivies uniquement comme des directives générales. Pour le nettoyage et la désinfection d'appareils médicaux, veuillez suivre le protocole standard de votre établissement.

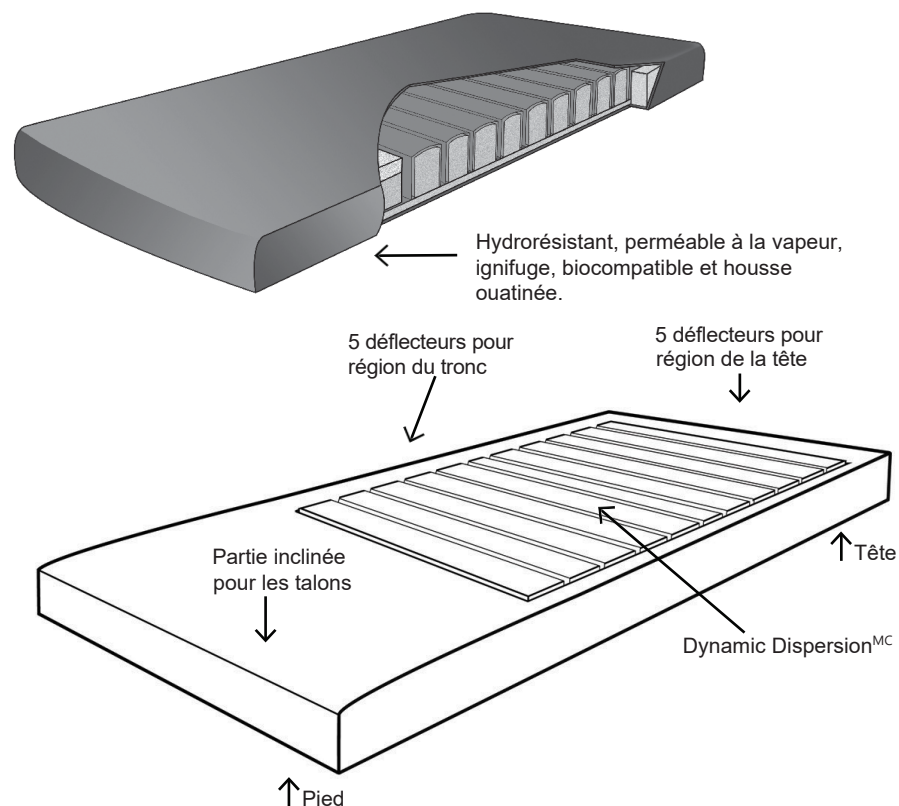

Mesures de sécurité :

L'utilisation de côtés de lit avec un système de matelas FUSION XC doit être évaluée en se basant sur le protocole de l'établissement, les lois et réglementations en vigueur et les éléments à prendre en compte pour la sécurité de l'utilisateur.

L'utilisation de côtés de lit n'est pas requise pour le bon fonctionnement d'un produit FUSION XC, mais des exigences de sécurité individuelle et/ou le protocole de l'établissement peuvent imposer leur utilisation.