



Blake
Medical Distribution

Commode Pad Vaske instruktion



Betræk: Maskinvaskes ved max.
60 grader Kun let centrifugering Kun
lufttørring.

Geo-Matrix gel Tag Geo-Matrix
gel måtterne ud af betrækket.

Maskinvaskes ved max. 60 grader.
Kun let centrifugering. Kun lufttørring.

Herefter placeres gel måtterne igen
under betrækket, med pillowtop
(mindste huller) hullerne øverst.
Det skal sikres at både gel måtter
og betræk er 100 % tør inden
genplaceringen.

Geo-Matrix gel måtterne og
betrækket kan også desinficeres*
med klud og derefter lufttørres.

**Brug IKKE produkter der indeholder KLOOR
eller andre blegemidler.*

www.blakemedical.ca